




VADE-MECUM A DESTINATION DES PILOTES

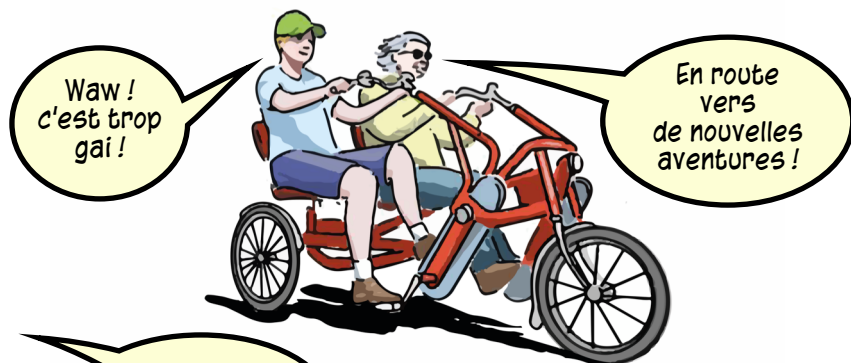


FUN2GO




Et c'est tout simple !

En actionnant la 1ère manette située côté arrière à droite du siège, celui-ci pivote sur son axe afin de le positionner perpendiculairement vers la droite, facilitant l'assise du copilote.

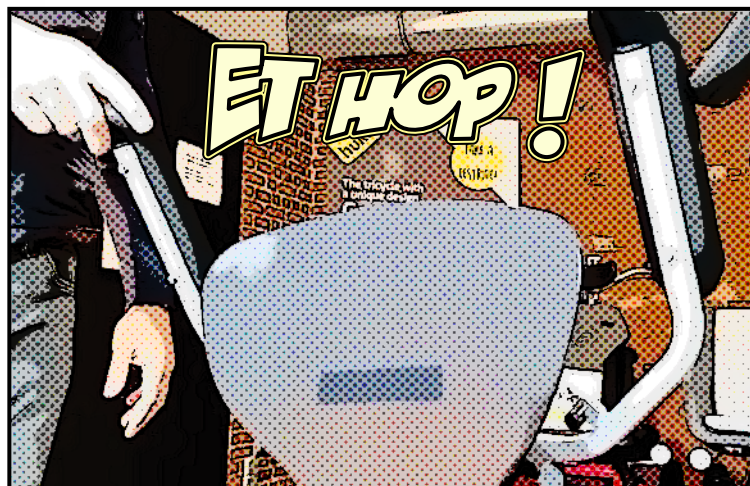


Les accoudoirs se relèvent et s'abaissent. C'est plus simple pour installer le copilote et plus confortable pour lui.

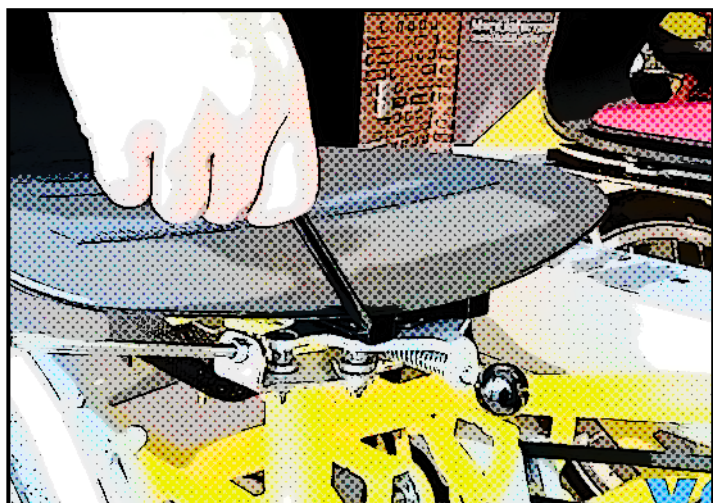


La 2ème manette permet d'ajuster la distance du siège par rapport aux pédales (ou repose-pied) et guidon



Le copilote a le choix de pédaler ou de déposer ses pieds sur le repose-pied. Ce dernier, en position rangée, se situe sous le siège du pilote. Il faut le déclipser en le soulevant légèrement puis le faire pivoter et clipser sous la position du siège du copilote.

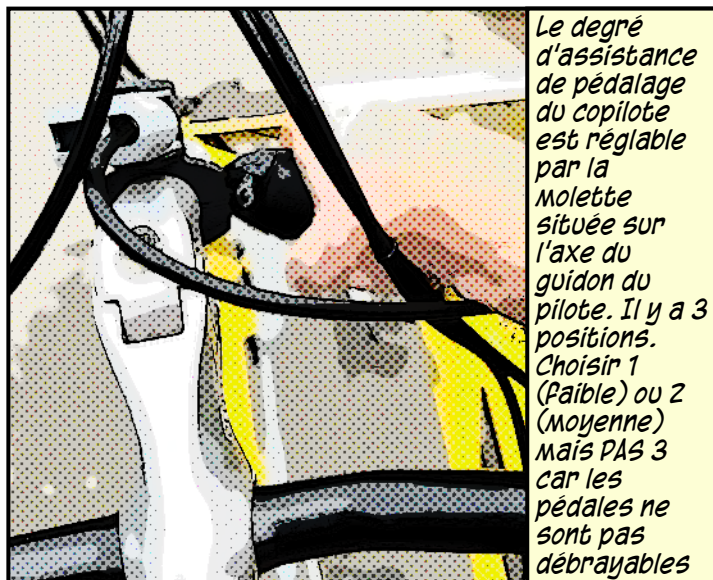

Le degré d'assistance de pédalage du copilote est réglable par la Molette située sur l'axe du guidon du pilote. Il y a 3 positions. Choisir 1 (faible) ou 2 (moyenne) mais PAS 3 car les pédales ne sont pas débrayables

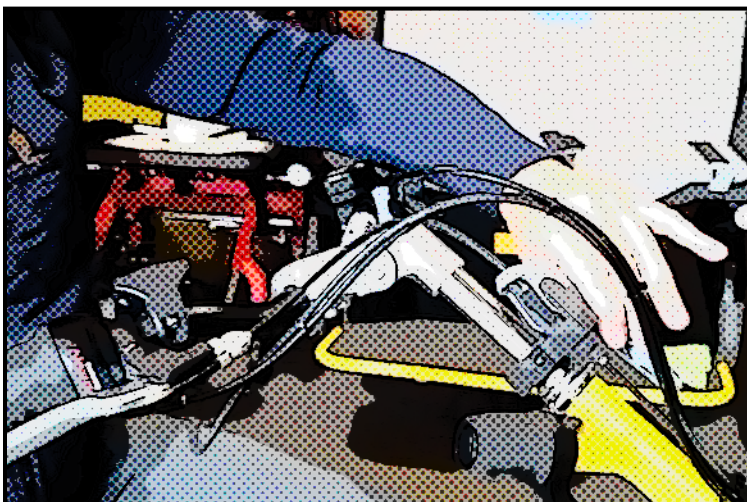

Le Frein à main se trouve sur l'axe du guidon du pilote.

PAGE .1

